

mediven® complice

Élégance, finesse, douceur

L'efficacité médicale associée à l'élégance d'une chaussette de ville. L'exigence en toute saison.



- Bas | chaussettes
- Disponible en 5 coloris
- Pied fermé

Tous les produits medi sont dermatologiquement testés et conviennent aux peaux sensibles et atopiques.



Les fibres climatiques permettent d'évacuer activement l'humidité et de réguler la température.

Certaines spécificités ci-contre ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Demandez conseil à votre pharmacien ou orthopédiste.

À LIRE ATTENTIVEMENT

Les bas et chaussettes de compression médicale sont des dispositifs médicaux. Demandez conseil à votre médecin.

les bas de compression médicale doivent correspondre à vos mesures. Elles peuvent être prises en pharmacie ou chez l'orthopédiste. L'évolution de leur pression est contrôlée. Elle est la plus forte au niveau de la cheville puis dégressive vers le haut de la jambe.

ENTRETIEN DES BAS DE COMPRESSION

Conseils de lavage pour nettoyer correctement les bas de compression:

- Lavez vos bas de compression tous les jours.
- Les bas de compression medi peuvent être lavés en machine, à 40° avec le programme linge délicat.
- N'utilisez que de la lessive spéciale linge délicat. N'utilisez pas d'adoucisseur qui pourrait ramollir les fils élastiques qui délivrent la bonne pression.
- Ne faites jamais sécher les bas de compression au soleil ou sur un radiateur avec une chaleur sèche.
- Tous les modèles medi peuvent être séchés au sèche-linge (programme pour linge délicat).
- Ne faites pas nettoyer les bas de compression à sec, ne les repassez pas, n'utilisez pas d'eau de javel ni de chlore.
- Pour mieux ménager vos bas de compression pendant leur lavage, nous vous recommandons d'utiliser le filet à linge.

MENTIONS LÉGALES

mediven: Bas médicaux de compression lymphatique et veineuse. Indications : Traitement des maladies lymphatiques et veineuses et prévention de leurs complications. La prise de mesures précise permet de bien respecter le tableau de tailleage. L'essayage garantit l'adaptation parfaite au patient. Consulter attentivement la notice d'utilisation, les indications et les contre-indications, notamment en cas de pathologies de la peau, du cœur ou des artères. Demander conseil à votre professionnel de santé, prescripteur ou applicateur. Informations pour un bon usage : Enfiler dès le réveil et au lever sur une peau propre et sèche. Le massage sur la jambe évite la formation de plis. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : société medi. Janvier 2014.